



ONE STEP Anti-HIV (1&2) Test

(Whole blood, serum or plasma)



Как показано выше, подготовьте все необходимые компоненты для тестирования. (Секундомер и перчатки в комплект набора не входят, но они необходимы и должны быть доступны)



Подтвердите наименование товара и убедитесь, что он запечатан.



Проверьте срок годности на упаковке (не использовать при истечении срока годности).



Оденьте перчатки (используйте новые перчатки отдельно для каждого пациента).



Промаркируйте идентификационные данные пациента на каждой тест-кассете.



Протрите палец пациента проспиртованным тампоном (спирт должен подсохнуть перед прокалыванием пальца).



Поверните верхнюю часть скарификатора по часовой стрелке и удалите её.



Установите скарификатор прямо в зоне прокола пальца и скарификатор выстрелит. **Протрите первую каплю крови с пальца.** Выбросьте использованные скарификаторы в специальную урну немедленно.



Аккуратно сжать пипетку и прикоснуться кончиком к капле крови вышедшей из пальца. Освобождая пипетку наберите кровь.



Добавьте 1 каплю (30 мкл) крови в ячейку «S».



Добавьте 1 каплю разбавителя крови (50 мкл) в ячейку «S»



Прочтите результаты в течении 15 мин. Не считывайте результаты по истечении 20 мин.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ



НЕВЕРНЫЙ

